

# FLOW

NEUROSCIENCE



## Depression verstehen & wirksam behandeln

Wissenschaftlich fundiert • Spürbare Ergebnisse bereits nach 3 Wochen  
Ohne signifikante Nebenwirkungen • 30 Tage zu Hause testen

NEUROLITE

Advanced Medical Solutions

# Depression verstehen – gezielt behandeln

**Sanft. Zielgerichtet. Wissenschaftlich fundiert.**

## **Moderne Neurowissenschaft zeigt:**

Depression betrifft nicht nur chemische Prozesse, sondern auch die Aktivität bestimmter Hirnregionen – besonders des dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC). Diese Region steuert unsere Stimmung, Motivation und emotionale Balance.

Bei Depressionen ist die Aktivität der Nervenzellen dort verringert – das kann zu folgenden Symptomen führen:

- Anhaltende Niedergeschlagenheit
- Verlust an Freude und Interesse
- Schlaf- und Appetitveränderungen
- Konzentrationsprobleme
- Erschöpfung und Antriebslosigkeit

Früher wurde von einem «chemischen Ungleichgewicht» im Gehirn gesprochen. Heute wissen wir: **Depression verändert auch die gesamte Funktionsweise des Gehirns** – und braucht eine entsprechend gezielte Behandlung.

Das Flow-Headset stimuliert den DLPFC durch einen sanften Gleichstrom (2 mA – etwa so stark wie eine AA-Batterie in Standby). So wird die gesunde Hirnaktivität Schritt für Schritt wieder aufgebaut – und depressive Symptome an der Ursache behandelt.



# Ist Flow das Richtige für mich?

**Sanfte Unterstützung bei Depression – ohne signifikante Nebenwirkungen.**

Flow kann eine wirksame und gut verträgliche Ergänzung in der Behandlung von Depression sein – auch in Kombination mit anderen Therapien. Es handelt sich um eine nicht-invasive Methode ohne signifikante Nebenwirkungen, die für viele Menschen geeignet ist.

- Flow wirkt auch **ergänzend** zu Antidepressiva und kann deren Effekt verstärken.
- **Sicher** – auch bei anderen psychischen oder körperlichen Erkrankungen.
- Geeignet für Erwachsene mit diagnostizierter **leichter bis schwerer Depression**.


*Vor Behandlungsbeginn wird empfohlen, mit Ihrer:m Ärzt:in zu sprechen – besonders bei Schwangerschaft, Metallimplantaten im Schädel, Epilepsie oder Hautproblemen an der Stirn.*

Sie haben nichts zu verlieren – nur Lebensqualität zu gewinnen.

Flow ist risikofrei und kostengünstig testbar, wissenschaftlich fundiert und benutzerfreundlich. Testen Sie das Headset 30 Tage lang für CHF 98.–. Bestellen Sie es ganz einfach auf: [www.flowneuroscience.ch](http://www.flowneuroscience.ch)

Laden Sie anschliessend die App herunter, die Sie Schritt für Schritt durch die Anwendung und die Behandlung führt.

So finden Sie ganz einfach selbst heraus, ob Flow für Sie geeignet ist.

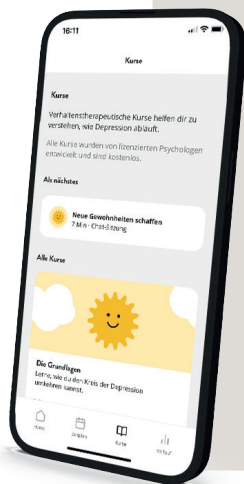


**Laden Sie die kostenlose App herunter.**

Verbinden Sie Ihr Headset per Bluetooth mit Ihrem Telefon und starten Sie die Stimulation.



# Bringen Sie Ihr Gehirn ins Gleichgewicht

**Erste Ergebnisse nach 3 Wochen – 6 Monate für dauerhafte Balance.**

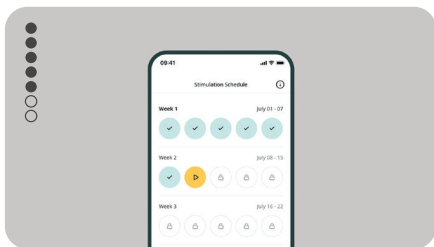

## **Aktivierungsphase (Woche 1 – 3)**

5x\* pro Woche, 3 Wochen lang

## **Warum 6 Monate Behandlung?**

Verbesserungen zeigen sich meist nach etwa 3 Wochen. Die ersten 6–12 Monate nach der Behandlung sind aber entscheidend, um Rückfälle zu verhindern. Dein Gehirn bleibt in dieser Zeit anfälliger für depressive Muster. Eine kontinuierliche Behandlung mit Flow unterstützt die langfristige Stabilität Ihrer Stimmung.




## **Stärkungsphase (Woche 4 – 10)**

2x\* pro Woche, bis zum Ende des 10-Wochen-Zyklus

*\* Eine Flow-Stimulation dauert 30 Minuten.*

*In der App finden Sie begleitende Übungen aus der kognitiven Verhaltenstherapie – sie können die Wirkung zusätzlich unterstützen.*

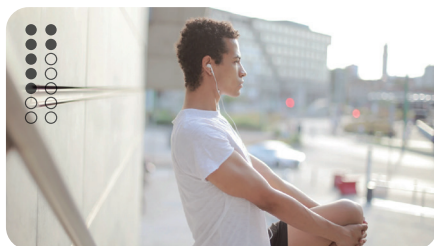

## **Erhaltungsphase (ab Woche 10)**

Nach 10 Wochen können Sie entweder das Headset zurücksetzen, um die Anzahl der Sitzungen pro Woche zu erhöhen – oder 2x\* pro Woche weitermachen.



# So hilft Flow ihrem Gehirn

## Nachweisliche Verbesserungen nach 10 Wochen

Real-World-Daten zeigen deutliche Verbesserungen der Symptome nach 10 Wochen Anwendung von Flow:

---

**Stimmung:**

+37 %

---

**Lebensfreude:**

+32 %

---

**Konzentration:**

+31 %

---

**Weniger Angst:**

+31 %

---

**Schlafqualität:**

+25 %

---

**Emotionale Beteiligung:**

+35 %



# Sie gehen kein Risiko ein

**Testen Sie Flow für CHF 98.– ganz einfach zu Hause**

**Bei jeder Bestellung ist automatisch eine 30-tägige Testphase inklusive.**

Bestellen Sie das Flow-Testpaket für CHF 98.–, inklusive Pads, MwSt. und Versand. Nach der Bestellung erhalten Sie das Flow-Headset innerhalb von 1–3 Werktagen.

Starten Sie die Behandlung, indem Sie die kostenlose App herunterladen, und testen Sie Flow 30 Tage lang bequem zu Hause.

**Nach 30 Tagen entscheiden Sie:**

**Flow behalten:** Sie erhalten eine E-Mail mit einem Zahlungslink für den Restbetrag von CHF 452.–. Eine Zahlung per Rechnung ist auf Wunsch ebenfalls möglich – hierfür kontaktieren Sie uns einfach.

**Flow zurückgeben:** Senden Sie das Headset innerhalb der Testphase zurück, zahlen Sie lediglich die Testgebühr von CHF 98.–.



**flowneuroscienceswitzerland**

**FLOW Neuroscience c/o NEUROLITE AG**

Hühnerhubelstrasse 79  
3123 Belp  
Switzerland

T +41 (0)31 529 28 31  
flow@neurolite.ch  
**www.flowneuroscience.ch**